

# MODALITÀ DI USO MASCHERINE FFP2/FFP3 (FACCIALI FILTRANTI)

*È importante indossare la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.*

## PRIMA DI INDOSSARLE:



**ASSICURARSI CHE IL VISO SIA PULITO E RASATO. I RESPIRATORI NON DEVONO ESSERE INDOSSATI IN PRESENZA DI BARBA, BAFFI, BASETTE CHE POSSONO IMPEDIRE UNA BUONA ADERENZA AL VOLTO**




**ASSICURARSI CHE I CAPELLI SIANO RACCOLTI INDIETRO E NON CI SIANO GIOIELLI CHE INTERFERISCONO CON IL BORDO DI TENUTA DEL RESPIRATORE**

## PER INDOSSARLE CORRETTAMENTE

- lavarsi le mani;



- Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto e aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore e inferiore fino ad ottenere una forma di conchiglia (Sollevare le estremità dei lembi del respiratore e modellare lo stringinaso esercitando una leggera pressione al centro - Tenendo il respiratore sul palmo della mano tirare il lembo inferiore per ottenere la configurazione a conchiglia).
- Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
- Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente dispiegati

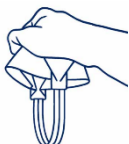

- Capolgere il respiratore ed afferrare gli elastici.
- Tenere il respiratore a coppa in una mano con il lato aperto rivolto verso il viso.



- Afferrare entrambi gli elastici con la mano libera.
- Posizionare il lembo inferiore del respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra la testa



- Posizionare l'elastico superiore sulla parte alta della testa e quello inferiore sotto le orecchie.
- Gli elastici non devono essere incrociati o ritorti.
- Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi che i lembi e la linguetta sul lembo inferiore non siano ripiegati



- Con entrambe le mani modellare lo stringinaso intorno al setto nasale per assicurare una buona aderenza al viso e una buona tenuta.
- Premere lo stringinaso con una sola mano può determinare una minor tenuta e una minore prestazione del respiratore



- Per verificare la tenuta eseguire la PROVA DI TENUTA
- coprire l'elemento filtrante con entrambe le mani con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarlo e a non modificare la tenuta
  - se si avverte una perdita di aria dai bordi del facciale ovvero problemi di tenuta, si deve regolare nuovamente e ripetere la prova, nello specifico:
  - se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle
  - se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino ad eliminarle

## PER TOGLIERLE

- Lavarsi le mani
- Prendere gli elastici e portarli in avanti tendo avendo cura che la mascherina non cada;
- Portare lentamente in avanti le mani;

## NOTE

**SI INVITA TUTTO IL PERSONALE A FARNE UN USO CORRETTO E DILIGENTE AL FINE DI GARANTIRE LA DURATA NEL TEMPO, SI RICORDA INFATTI CHE SI TRATTA DI DISPOSITIVI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA PER L'USO NELL'AMBIENTE DI LAVORO.**

**SI RICORDA CHE LA MASCHERINA È PERSONALE E PER NESSUNA RAGIONE DEVE ESSERE CEDUTA A TERZI.**